
Montageanleitung

Bitte entnehmen Sie nach dem Öffnen des Kartons den gesamten Inhalt und prüfen Sie ihn auf Vollständigkeit.

Bestehend aus:

1x Stuhlgrundkörper

1x Gasdruckfeder

1x Fußkreuz mit Rollen

Für den Aufbau benötigen Sie kein Werkzeug.

Stellen Sie das Fußkreuz auf eine ebene Fläche und stecken die Gasdruckfeder mit der dickeren Seite in das Loch des Fußkreuzes. Nun nehmen Sie den Stuhlgrundkörper und positionieren ihn mittig über der Gasdruckfeder, lassen Sie den Stuhlgrundkörper langsam auf die Gasdruckfeder absinken.

Fertig!

Zum Schluss setzen Sie sich einmal beherzt auf Ihren fertig montierten Stuhl um alle Komponenten fest mit einander zu verbinden. Die Bauteile haben konische Steckverbindungen.

Sicherheitshinweis:

Aus Sicherheitsgründen sind die Rollen gebremst wenn der Stuhl nicht belastet wird. Dieses verhindert ein unkontrolliertes Rollen bei abschüssigem Untergrund.

